



Haltbarkeit im Anbruchgebinde / offenen Gebinde

Haltbarkeit vor Anbruch

Auf den Etiketten aller HARTMANN-Produkte finden sich Angaben zur Haltbarkeit vor Anbruch des Gebindes:

- „Verwendbar bis“ bei Arzneimitteln zur Händedesinfektion oder Hautantiseptik
- „Mindestens haltbar bis“ bei Kosmetika sowie
- „☞“ bei Medizinprodukten und Biozidprodukten.

Haltbarkeit nach Anbruch im fest verschlossenen Gebinde

Als Anbruchstabilität unserer Produkte in geöffneten und jeweils wieder fest verschlossenen Gebinden wurden folgende Zeiträume ermittelt:

<i>Produktgruppe</i>	<i>Haltbarkeit im Anbruchgebinde</i>
alkoholische Hände-Desinfektionsmittel	12 Monate (kann bei Verwendung im Spender abweichen s. „Haltbarkeit beim Einsatz von Hände-/Haut- Produkten in Wandspendern“)
alkoholische Hautantiseptika	12 Monate
Haut-/Hände-Reinigungsprodukte (Waschlotionen)	12 Monate
<u>Ausnahme:</u> Stellisept med gloves	1 Woche
Haut-/Hände-Pflegeprodukte	12 Monate
Instrumenten-Reiniger	12 Monate
Instrumenten-Desinfektionsmittel	12 Monate
Flächen-Desinfektionsmittel	12 Monate
<u>Ausnahmen:</u> Bacillo® Wipes	28 Tage
Bacillo® Tissues in der Spenderbox	3 Monate
Bacillo® AF Tissues im Flowpack	3 Monate
Bacillo® 30 Tissues /XXL im Flowpack	3 Monate
Mikroba® Tissues/XXL im Flowpack	3 Monate
Mikroba® Virucidal Tissues	Maximal 4 Wochen bei täglicher Entnahme. Nach Entnahmepause von mehr als 1 Woche ist die Verpackung zu verwerfen.
Kohrsolin® extra Tissues im Flowpack	3 Monate
Kohrsolin® FF Tissues im Flowpack	3 Monate
Flächen-Reiniger	12 Monate



BODE SCIENCE CENTER

Wir forschen für den Infektionsschutz.
www.bode-science-center.de



Diese Aussagen gelten nur für geöffnete Originalgebinde und nicht für Dosierbeutel, da diese zum Einmalgebrauch bestimmt sind.

Beim Umfüllen in andere Gebinde besteht, neben gesetzlichen Bestimmungen, ein Risiko durch Verkeimung und dem Vermischen mit Produktresten.

Haltbarkeit beim Einsatz von Hände-/Haut-Produkten in Wandspendern

Die Konstruktion der HARTMANN-Eurospender und der zugehörigen Standardpumpen bietet die beste Gewähr für den Schutz des Flascheninhaltes. Dennoch sind Spendersysteme grundsätzlich als offen anzusehen. Als Anhaltspunkt für die Haltbarkeit des Präparates bzw. Produktes sind daher immer die entsprechenden Herstellerangaben für geöffnete und nicht wieder fest verschlossene Behälter bzw. Flaschen zu berücksichtigen.

Alle Präparate in den HARTMANN-Eurospendern sowie Flaschen mit aufgeschraubter Standardpumpe bzw. Sprühkopf sind 12 Monate nach Anbruch haltbar. Ausnahmen gelten bei den alkoholischen Hände-Desinfektionsmitteln im Eurospender 1 und im Eurospender 2000. Diese weisen eine Haltbarkeit von 6 Monaten nach Anbruch auf.

Die für den Spendereinsatz ermittelten Daten sind natürlich nur dann gegeben, wenn sich die Spender in einem einwandfreien hygienischen Zustand befinden und keine Produktreste neue Ware kontaminieren können.

Die Kennzeichnung der Haltbarkeit nach Anbruch liegt in der Verantwortung des Anwenders.


Dr. Gerhard Bredthauer
Qualitätskontrolle


Dr. Brigitte Hérít
BODE SCIENCE CENTER

Stand: Juni 2018
© BODE Chemie GmbH

EX1400080DE_0618_11