


Technisches Datenblatt



MaiMed® MyClean DS

Schnelldesinfektion

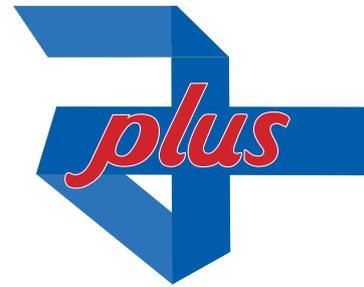

Alkoholische Schnelldesinfektion

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), und begrenzt viruzid PLUS (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und Corona-Viren (SARS-CoV-2 + VOC)
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Aldehydfrei
- VAH-gelistet



Duftrichtungen: Orange/Lemon/Pfirsich/Apfel/Vanille

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkohol- und wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten sowie Gegenständen in Kliniken, Praxen und im patientennahem Umfeld (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialbeständigkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Flächen vollständig abwischen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ggf. mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

Ausführungen: MaiMed® MyClean DS – Schnelldesinfektion


Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schnelldesinfektion	Orange	10 Liter	79617	4046153116256	10297739	1 Kanister
Schnelldesinfektion	Lemon	10 Liter	79618	4046153116270	10305858	1 Kanister
Schnelldesinfektion	Pfirsich	10 Liter	79619	4046153116294	10305864	1 Kanister
Schnelldesinfektion	Apfel	10 Liter	79620	4046153116317	10305870	1 Kanister
Schnelldesinfektion	Vanille	10 Liter	79621	4046153116232	10805841	1 Kanister

Einwirkzeiten:

Einwirkzeiten für den Hygienebereich	
Bakterizid, levurozid mit Mechanik (EN 13624, EN 13727 und EN 16615; hohe Belastung):	1 Minute
Mykobakterizid (nach VAH-Methode; hohe Belastung):	5 Minuten
Tuberkulozid (EN 14348; geringe Belastung):	1 Minute
Viruzidie nach EN 14476	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Minute
Vaccinia-Viren, Adeno-Viren und Noro-Viren (geringe Belastung):	1 Minute

Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoff: 50 g Ethanol


Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa
UFI: MWD0-30C4-P004-2EGM

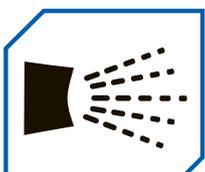

MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed® MyClean DS-Schnelldesinfektion-Duft-2021-05

Technisches Datenblatt

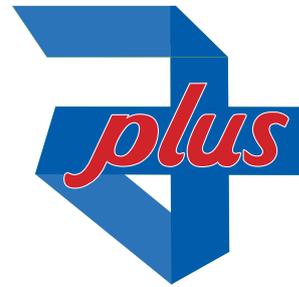

MaiMed® MyClean DS

Schnelldesinfektion




eClass: 30-30-01-02

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

    **UN 1170**  **Achtung**
0482

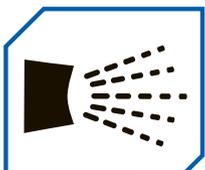

 MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed® MyClean DS-Schnelldesinfektion-Duft-2021-05